

スイッチ接続キット

- 設定済
変わる君のみ
- 有線
- 有線無線

✓印がついているものが納品物です。

製品名	設定・内容	納品
変わる君	ボタン・ボタン	
S/N	めくってタップ・ボタン	
	パターン・ボタン	
	その他	
USB2BT Plus	ACアダプタ、ケーブル類付属	
USB変換アダプタ	USB-C・USB-Cケーブル	

ご購入年月日 2025 年 月 日

【変わる君について】

- 3.5mmプラグのスイッチを2個までつなげられる、インタフェース変換装置です。
- ファームウェアは、バージョン 1.0.2i (iOS,iPadOS用) です。スイッチ割り当てのためのマクロを設定済です。ジャック1・2は、上欄の✓印のある内容で設定済です。
- 変わる君本体にはテスト用のボタンがついています。スイッチを接続しなくても動作の確認をすることができます。
- 専用ユーティリティでキーの割り当て内容を変更したり、ボタン入力・パターン入力の変更をしたりできます。

【USB2BT Plusについて】

- USB HIDデバイスをBluetoothに変換するアダプタです。3台までの機器に切り替えて接続することができます。
- マグネットで接続する電源ケーブルを付属しています。AC電源や携帯電話用充電バッテリーに接続してお使いください。本体の電源口から磁石部品をはずした上で、市販のUSBマイクロBタイプケーブルを接続してお使いいただくこともできます。
- ペアリングボタンは3秒押しして接続設定してください。
- 専用ユーティリティで設定内容を変更することができます。

【変わる君の設定と主な使い方】

ボタン・ボタン

1または2つのスイッチをスイッチコントロールを使って操作。

めくってタップ・ボタン

1または2つのスイッチをスイッチコントロールを使って操作。

ジャック1は、スイッチコントロールを使用しない場合の指伝話メモリでは1回のスイッチ操作でページをめくりタップし読み上げる操作。

パターン・ボタン

ジャック1は、パターン入力による操作、ジャック2は、1つのスイッチをスイッチコントロールを使って操作する。

その他

カスタマイズした設定で、特定の用途に合わせた操作。



変わる君とUSB変換アダプタを接続した状態（有線接続）



変わる君とUSB2BT Plusを接続した状態（無線接続）

製品保証書（保証期間1年）

【お客様】

お名前

ご住所

【保証規定】

- 保証期間内に正常状態でご使用の場合に限り保証致します。万一保証期間内に故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理を致します。まずは弊社にお知らせください。その後、保証書を商品に添えて、宅配便・レターパック等送付控えが残る方法で弊社にお送りください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は保証期間内でも修理をお受け致しかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 修理のご依頼品を郵送またはご持参される場合の諸費用はお客様負担となります。
- 保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。


有限会社

オフィス結アジア


251-0012 神奈川県藤沢市村岡東3-12-10

Tel. 0466-21-7448, Fax. 0466-21-7996

Email. info@yubidenwa.jp

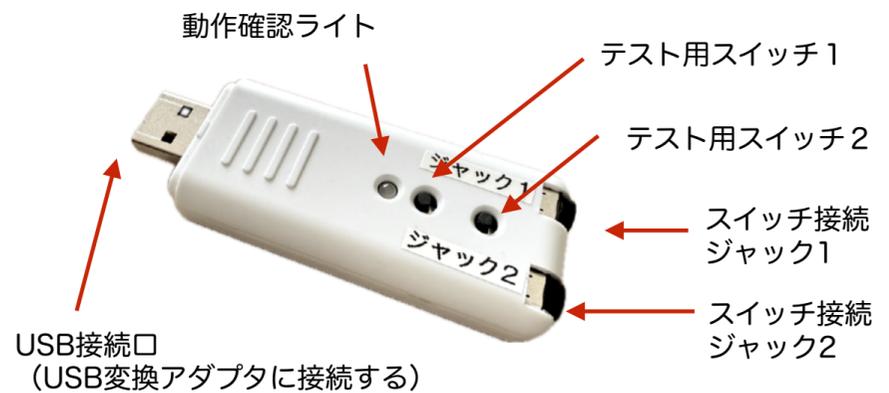

変わる君のスイッチと接続ジャック

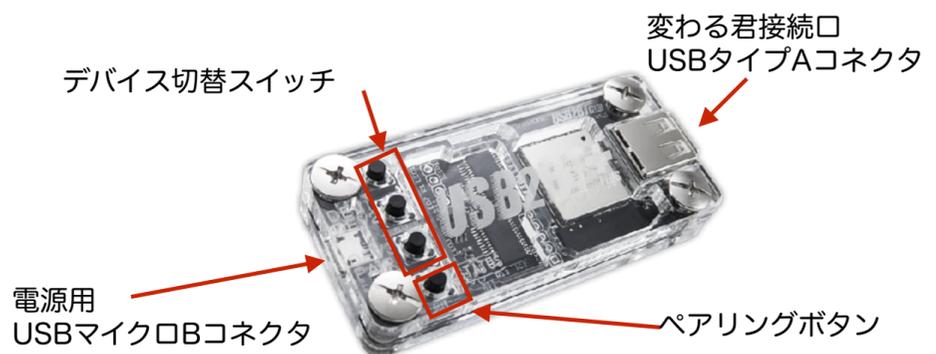


USB2BT Plusのスイッチと接続コネクタ

【変わる君のUSBキャップ取り外しについて】

安全のためUSBキャップを水平にした場合に抜きにくい構造になっています。

本体を支点にキャップを持ち、キャップを上下に揺らしながら抜くと取れるようになっています。

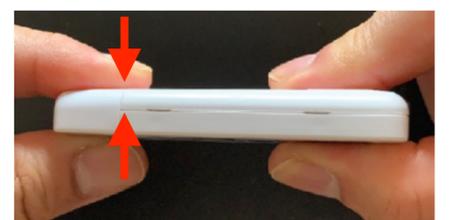

【スイッチ操作について】

- iOS/iPadOSはスイッチによる操作が可能です。
- 設定は、アクセシビリティのスイッチコントロールで行います。
- スイッチの登録では、スイッチ本体ではなく『変わる君』のジャックが登録されます。（別のスイッチに交換しても同じ設定で動作します）

- 指伝話メモリおよび指伝話文字盤は変わる君の設定を行い、スイッチコントロールを使わずにスイッチで操作する方法があります。

- 詳しい説明を、ウェブで公開しています。ご活用ください。




<https://www.yubidenwa.jp/switch/>

スイッチ接続キット 接続手順

【有線接続の場合】

- ①と②を接続します。
* 充電しながらお使いの場合は、アダプタをご利用ください。
外出時等は、ケーブルタイプが便利です。

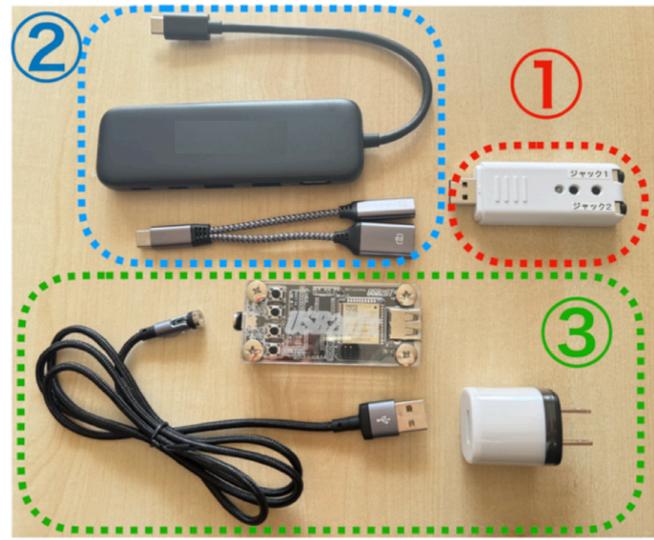

【同梱物】 ③は有線無線タイプに付属

- ① スイッチマクロ設定済み変わる君
- ② USB-C - USB 変換アダプタ
USB-C変換ケーブル
- ③ USB2BT Plus (電源口に磁石式の変換部品がついています)
電源ケーブル (磁石式)
USB ACアダプタ




- ・ iPadに接続します。
- ・ ジャック1 または ジャック2 に スイッチを繋ぎます。

アダプタは、iPadの充電口に挿す際のケーブル部分が長いため、iPadの背後にアダプタを固定させた設置方法も可能です。

【無線接続の場合】


- ・ ①と③ を接続します。
- ・ コンセントに挿します。
- ・ ジャック1 またはジャック2 にスイッチを繋ぎます。
- ・ ③とiPadを、Bluetoothで接続します。

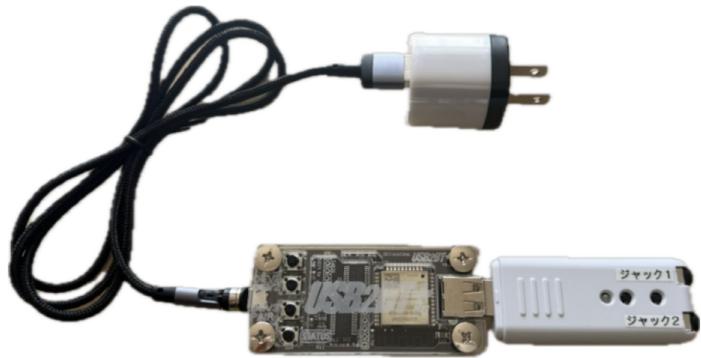

ACアダプタを使用せず、お持ちのモバイルバッテリーに接続して使用すれば、外出時に便利です。

無線接続では、②は使用しません。

USB2BT Plusの電源口は、磁石タイプのため **平行に抜かず、斜め方向に折るようにはせず**と部品が離れなくて良いです。
(電源口の破損防止になります)

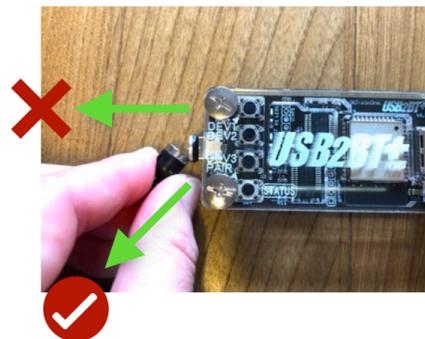

USB2BT Plusのペアリング (接続) 手順

USB2BT PlusのステータスLEDについて

- 1) USB2BT Plus に 変わる君 を接続します。
- 2) USB2BT Plus の電源を接続します。
- 3) USB2BT Plus 本体の機器を接続するボタン (3つのうちのいずれか) を押します。
ステータスLEDは赤で点滅します。
- 4) ペアリングボタンを長押しします。ステータスボタンは青で点滅します。
- 5) 接続する機器のBluetoothの設定画面を開きます。
iPadの場合、設定 アプリ > Bluetooth
- 6) デバイス一覧に USB2BT:22xxxxxx が表示されたら選択します。
- 7) 接続済み になれば接続完了です。

LEDの状態	機器の状態
消灯	未接続
紫	接続中
青	接続済
赤点滅	入力デバイス交換 (再ペアリングしてください)
青点滅	ペアリング中
赤青交互に点滅	USB電源またはUSB2BT Plus いずれかのハードウェアエラー